

APP UPDATE

medi vision®


App-Version 1.0.21

HERBST '24

Umgestaltung e-shop Kachel

medi

für nutzerfreundliche & einfachere Bedienung

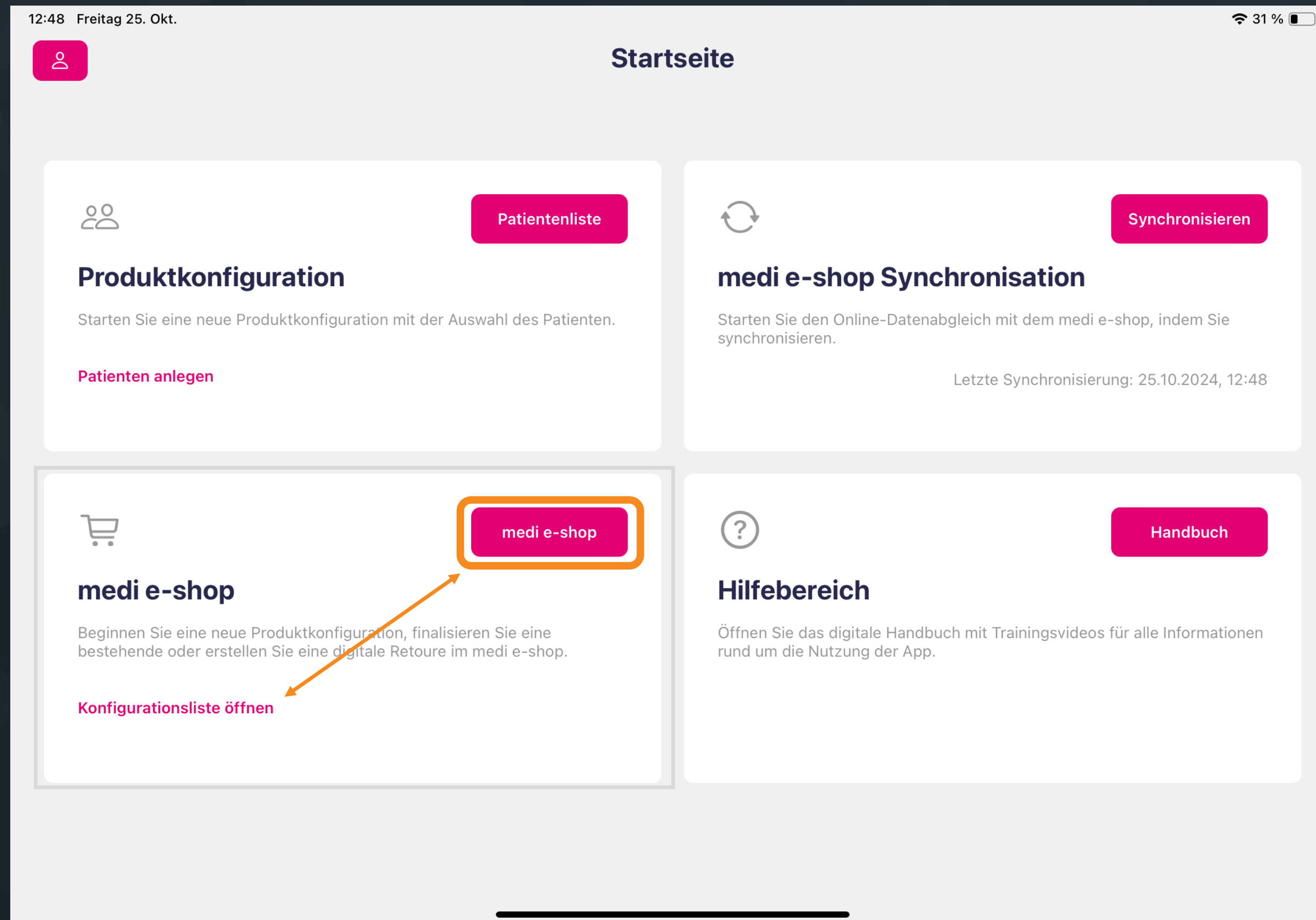


In der medi e-shop Kachel wurden die Buttons „medi e-shop“ und „Konfigurationsliste öffnen“ getauscht.


Der medi e-shop ist ab sofort direkt über den magenta farbenden Button oben rechts in der medi e-shop Kachel zu erreichen.

Erweiterung des Notizfeld

für mehr Nutzerfreundlichkeit bei der Produktkonfiguration

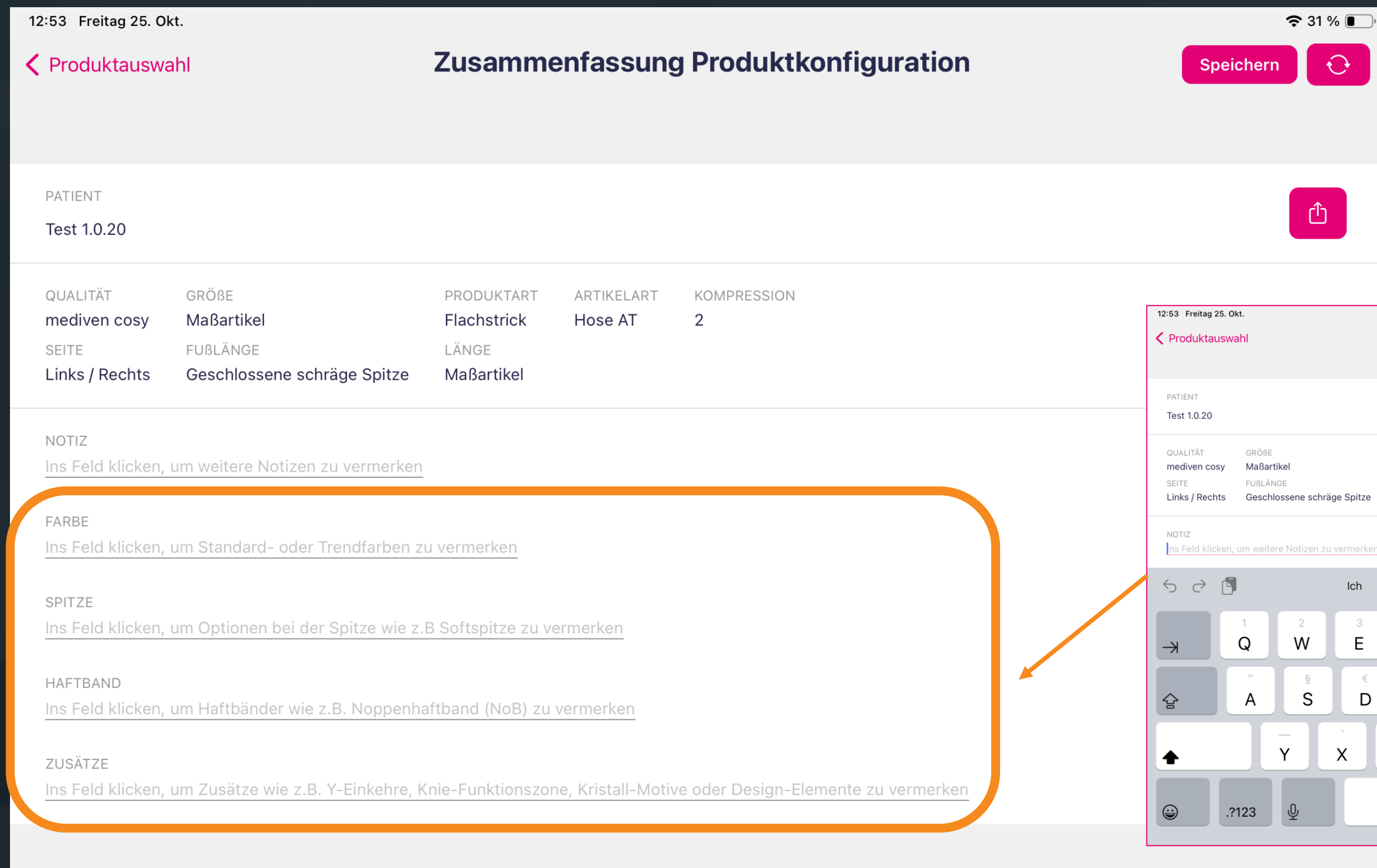

Ansicht im medi e-shop:



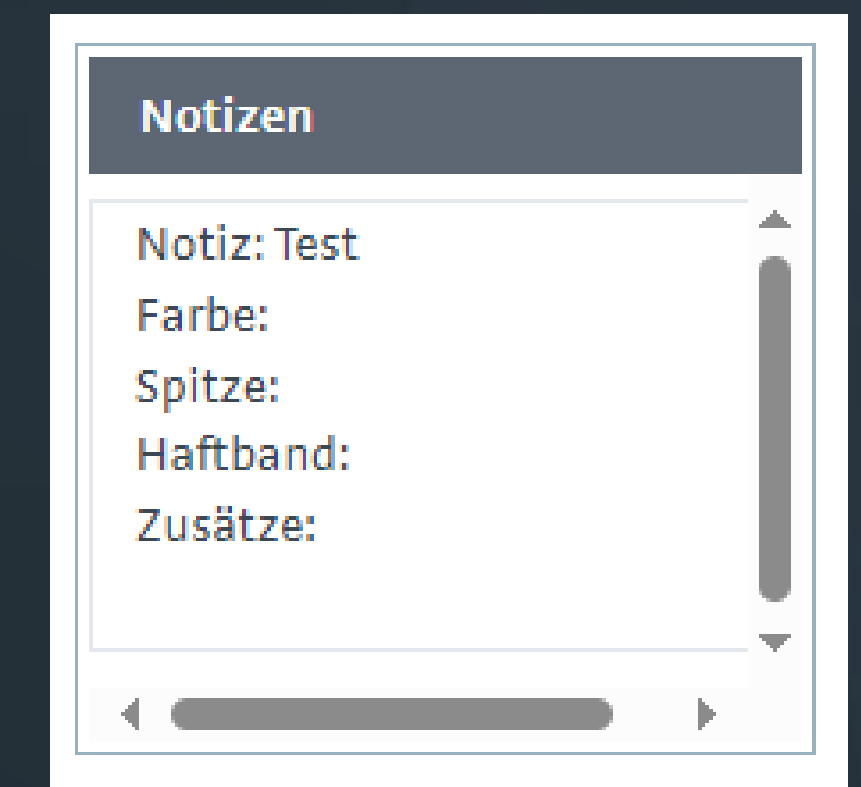


Das Notizfeld zum Abschluss der Produktkonfiguration wurde in mehrere Abschnitte unterteilt, so dass die Informationen zur Versorgung noch zielgerichteter festgehalten werden können. Mit der Enter-Taste können Sie einfach von Feld zu Feld springen.

Neues Format des PDF-Export



Export-Datei wurde ans medi Maßblatt angepasst

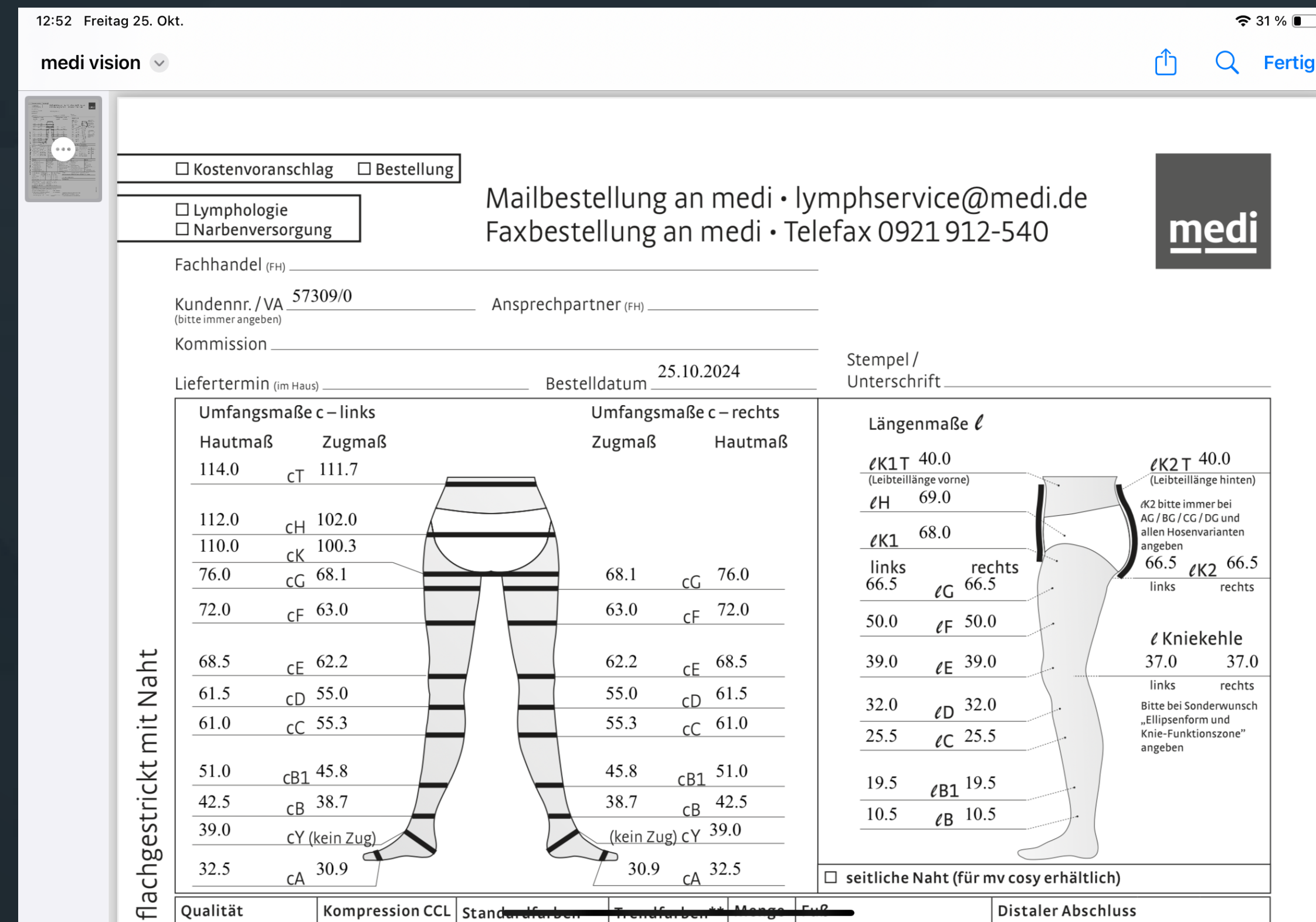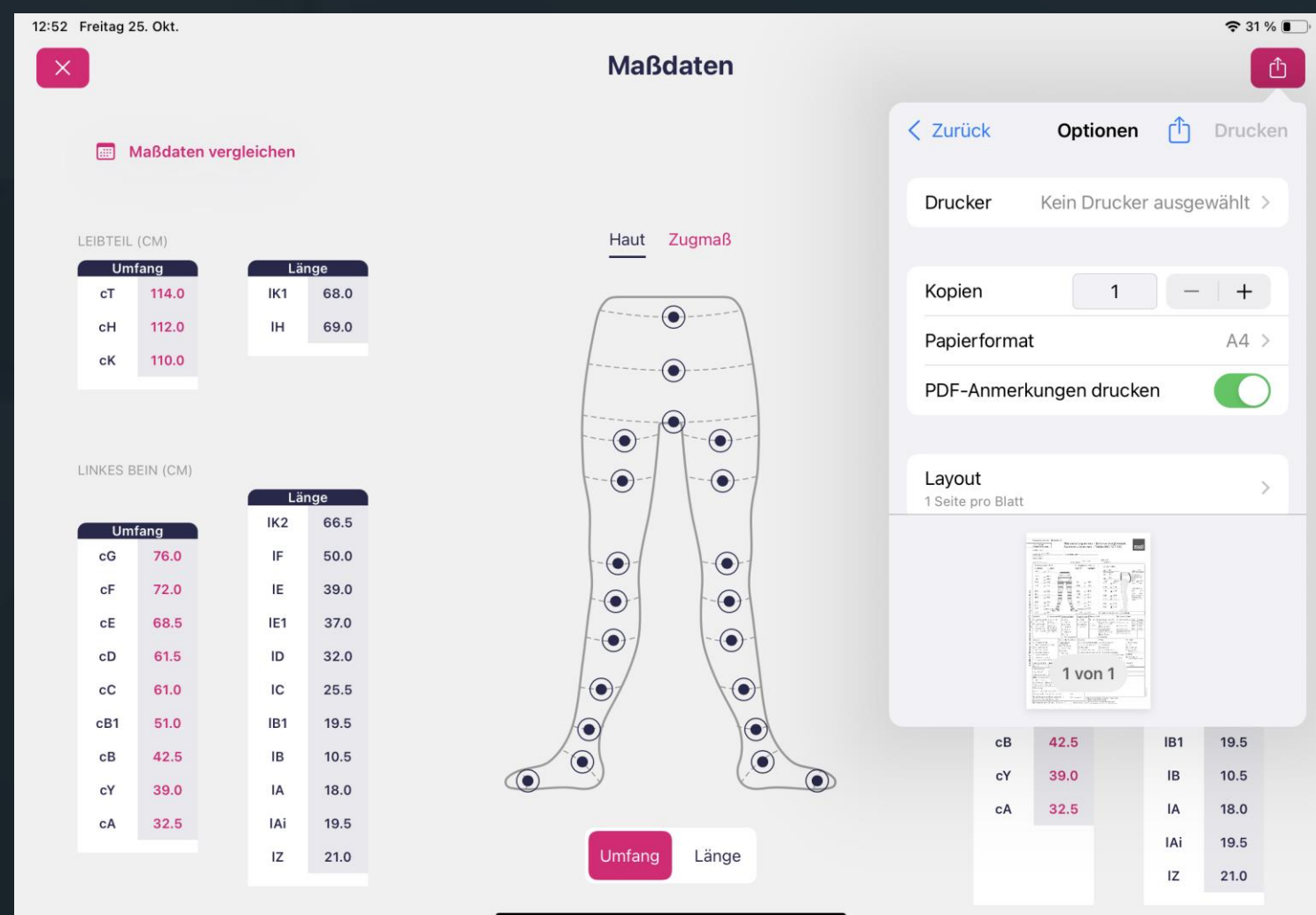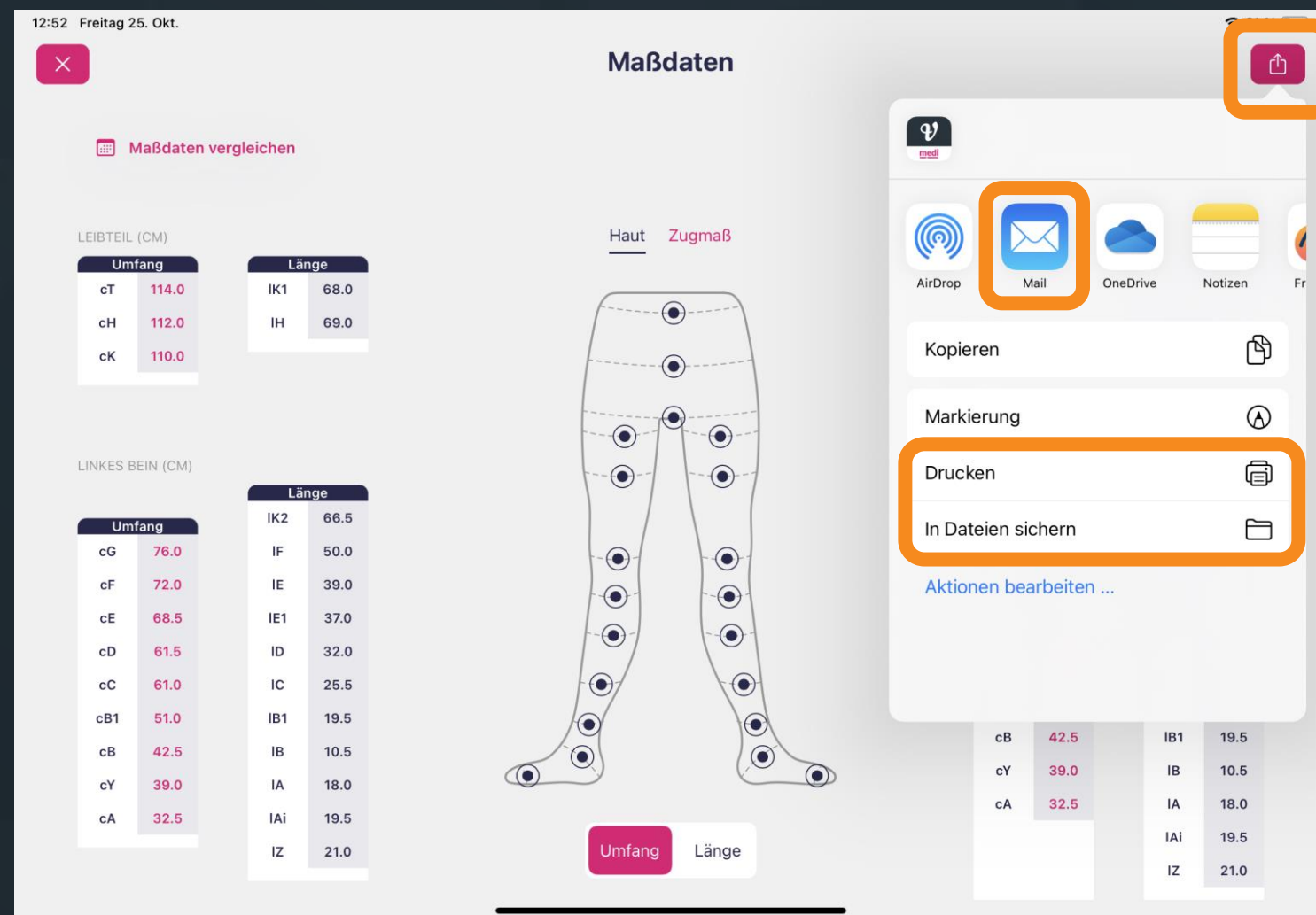

Das Maßblatt ist wie bisher auch direkt mit den eingegeben oder gescannten Maßdaten befüllt.

Sie können über die „Teilen“-Funktion das Maßblatt als PDF-Datei exportieren und ablegen, drucken oder per Mail versenden.

Angepasste Reihenfolge



für das Leibteil bei Flachstrick-Konfigurationen über die manuelle Eingabe

12:52 Freitag 25. Okt. 31 %

Automatischer Zugmaßvorschlag Speichern

Leibteil (cm)	
Ik2T	40.0
IH	69.0
Ik1T	40.0
IK1	68.0

Rechtes Bein (cm)	
IE1	37.0
IK2	66.5

Linkes Bein (cm)	
IE1	37.0
IK2	66.5

● Hautmaße
● Zugmaße
● Kontrollmaße

Maßpunkt antippen zum Bearbeiten

→ ←

Maßwerte auf das andere Bein kopieren

Umfang Länge

Links / Rechts
IK1 68.0

7	8	9
4	5	6
1	2	3
,	0	⊗

Weiter

< >

Die Maßpunkte für das Leibteil von Flachstrick-Konfigurationen werden jetzt in der Reihenfolge des manuellen Messprozesses abgefragt.

Status für Synchronisation



Anzeige zum Fortschritt der Synchronisation zwischen App und medi e-shop

